

Bota Imobilizadora

ROBOFOOT®



As imagens presentes neste material gráfico são ilustrativas e detalhes do produto podem variar.

SALVAPE®



A **SalvaPé Produtos Ortopédicos** foi fundada há mais de 80 anos pelo imigrante alemão George Marx, que decidiu instalar na região central de São Paulo, uma loja fornecedora de vários tipos de órteses sob medida. A segunda geração de George, Pedro Hiller, no atual comando da empresa, deu um novo impulso aos negócios: as órteses até então sob medida, passaram a ser fabricadas em diversos tamanhos com a confecção em alta escala. A empresa perdeu o caráter de loja para se tornar fabricante, importadora e distribuidora de uma extensa linha de produtos para prevenção, tratamento e reabilitação. Sua atuação abrange o mercado hospitalar, cirúrgico, ortopédico e esportivo, atendendo as necessidades de ortopedistas, fisiatras, fisioterapeutas e pacientes. O pioneirismo, a tradição da marca e a qualidade dos produtos, mantêm a SalvaPé na liderança do mercado ortopédico brasileiro. São mais de 1.500 produtos, entre nacionais e importados, divididos em diversas linhas devidamente registradas nos órgãos competentes. Hoje, a SalvaPé é considerada nacionalmente, como uma das mais sólidas empresas no mercado ortopédico atuante no país.

Contato:

salvape@salvape.com.br

www.salvape.com.br

Tel.: 11 3346 4500



facebook.com/SalvapeOficial



A **Robofoot** é uma bota imobilizadora indicada para tratamento de diversas condições ortopédicas como fraturas estáveis, na ausência de deformidades graves, luxações, entorses e em substituição a goteira gessada. Atende pacientes de até 120kg.

Apresenta-se em 2 modelos:



- 608-2: Modelo Longo
Aprox. 42cm*

- 608-1: Modelo Curto
Aprox. 30cm*

*A altura varia de acordo com o tamanho da bota.





ROBOFOOT®

CARACTERÍSTICAS

1 - PLATAFORMA

2 - SOLADO

3 - PALMILHA

4 - PROTETOR DE CALCÂNEO E MALEOLOS

5 - HASTES DE FIXAÇÃO

6 - CINTAS DE AJUSTE

7 - FORRO

8 - TAMANHOS E PESOS DE CADA MODELO

9 - INSTRUÇÕES DE USO

10 - INFORMAÇÕES GERAIS



Características





ROBOFOOT®



1 - PLATAFORMA



Injetada em polietileno rígido na cor cinza prata, garantindo maior resistência e melhor imobilização quando comparado ao polietileno maleável, utilizado em botas imobilizadoras concorrentes.

Suporta até 120kg.



Plataforma



ROBOFOOT®

2 - SOLADO



A bota tem solado com discreta curva desenhada especialmente para facilitar a marcha.
Confeccionado em látex anti derrapante, fixado com alta temperatura em forno rotativo para evitar descolamento, e com excelente resistência a abrasão.

Solado

SALVAPE





ROBOFOOT®



3 - PALMILHA



A palmilha de sustentação é mais confortável e com absorção de impacto. Confeccionada em E.V.A na cor preta com 12mm de espessura.





ROBOFOOT®

4 - PROTETOR DE CALCÂNEO E MALEOLOS



Os protetores são confeccionados em E.V.A 12mm na cor preta proporcionam, além de conforto, estabilidade e imobilização.

Protetor


SALVAPE





5 - HASTES DE FIXAÇÃO

ROBOFOOT®

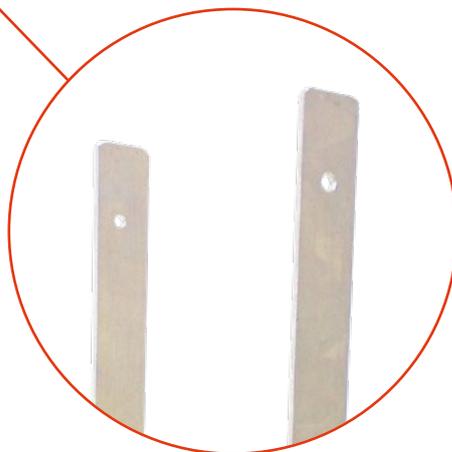

Confeccionadas em alumínio, de alta resistência revestida com material aderente que auxilia no ajuste das cintas e confere ao produto acabamento estético com sofisticação.



Hastes



ROBOFOOT®

6 - CINTAS DE AJUSTE



As cintas de ajustes são confeccionadas em material aderente do tipo “argola” e “gancho” com 5cm de espessura e possuem passantes que garantem estabilidade e facilidade no uso

Cintas





7 - FORRO



Possui forro interno que envolve o tornozelo e pé para garantir conforto.

Confeccionado em espuma de poliuretano de 10mm de espessura dublado em tecido tipo "pluma" composto 100% de "poliamida"

ROBOFOOT®



Forro





ROBOFOOT®

8 - TAMANHOS DE CADA MODELO

Para melhor adequar-se ao pé do paciente, a **Robofoot** possui variação de tamanhos que abrange do Infantil ao tamanho GG nas versões **Longa** e **Curta**.



		Tamanho	Calçado
MODELO CURTA	608-11*	Infantil	de nº 25 a 28
	608-12*	PP	de nº 29 a 34
	608-13	P	de nº 34 a 36
	608-14	M	de nº 37 a 39
	608-15	G	de nº 40 a 43
MODELO LONGA	608-21*	Infantil	de nº 25 a 28
	608-22*	PP	de nº 29 a 34
	608-23	P	de nº 34 a 36
	608-24	M	de nº 37 à 39
	608-25	G	de nº 40 à 43
	608-26*	GG	de nº 44 à 46

*Tamanhos não disponíveis no modelo Robofoot Nova Geração.

Tamanhos





ROBOFOOT®




9 - INSTRUÇÕES DE USO

1 - Para facilitar a colocação esteja sentado com o joelho em 90 graus. Solte todas as tiras do produto e retire o forro de espuma.



2 - Abra o forro de espuma para calçá-lo. Posicione o calcanhar no forro acomodando o pé e a perna. Feche o forro não apertando demais e não deixando pregas ou dobras.

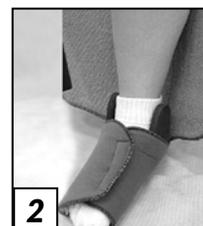

3 - Encaixe o pé já vestido com o forro de espuma na bota. O calcanhar deve ficar apoiado na parte posterior da bota.



4 - Feche em primeiro lugar a tira com fecho aderente próxima aos dedos e continue fechando as demais tiras de baixo para cima.



IMPORTANTE: O pé e o tornozelo devem ficar em posição funcional de 90 graus. Usar meia de algodão.





ROBOFOOT®

10 - INFORMAÇÕES GERAIS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

PRODUTO NÃO PERECÍVEL

VALIDADE: Indeterminada.

GARANTIA: A SalvaPé oferece garantia legal de 90 (noventa) dias. Esta garantia não cobre defeitos decorrentes de uso inadequado, acidentes ou adaptações/alterações. É de competência da SalvaPé reparar ou repor o produto após a análise de vício de qualidade.

Fabricado por: SALVAPÉ - Produtos Ortopédicos Ltda.

R. Cesário Ramalho, 90 • Cambuci - São Paulo - SP

CNPJ. 60.883.741/0005-13 • Inscr. Est. 115.411.420.112

® Marca Registrada • Atendimento ao Consumidor: (11) 3346 4535



Informações Gerais

SALVAPE



Produtos Fabricados por:



 www.salvape.com.br

 (11) 3346 4535

 facebook.com/SalvapeOficial

 instagram.com/Salvape.Oficial